

Télécommande

Mode d'emploi

Sommaire

Introduction	3
Votre télécommande	6
Comment utiliser votre télécommande	7
Comment remplacer la pile	13
Nettoyage et maintenance	17
Dépannage	18
Mises en garde et avertissements	19
Informations légales	22

Introduction

Ce mode d'emploi contient des instructions sur l'utilisation de la télécommande. Pour plus d'informations sur l'utilisation de votre aide auditive, consultez le mode d'emploi de votre aide auditive.

Utilisation prévue

La télécommande est conçue pour être une télécommande sans fil pour nos aides auditives sans fil. La télécommande peut ajuster l'aide auditive en fonction des paramètres sélectionnés par l'audioprothésiste.

Groupe cible/profil d'utilisateur : La télécommande est destinée à être utilisée par des personnes peu expérimentées.

Indications thérapeutiques : L'accessoire n'a pas d'indications thérapeutiques en lui-même.

Contre-indications : Aucune contre-indication connue.

Symboles

Les symboles ci-dessous sont utilisés dans le Mode d'emploi, sur l'équipement ou sur l'emballage.



AVERTISSEMENT : Indique une situation pouvant entraîner des blessures mineures à modérées.



MISE EN GARDE : Indique une situation pouvant entraîner des blessures sérieuses.



Date de fabrication.



Fabricant légal.



Marque de conformité réglementaire pour l'UE.



Suivez les instructions d'utilisation. (Logo en bleu)



Marque de conformité réglementaire pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande.



MISE EN GARDE : Pile bouton : Indique une situation pouvant entraîner des blessures sérieuses.

Compliance with
IMDA Standards
for WEEE




Label IMDA pour Singapour. 

Suivez les réglementations
locales lors de la mise au
rebut des équipements
électroniques.


Cet équipement dispose
d'un émetteur RF.

Votre télécommande

1. Voyant lumineux LED
2. Bouton d'augmentation du volume
3. Bouton de réduction du volume
4. Bouton sélecteur de programme

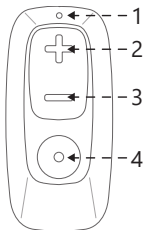

5. Vis pour fixer le couvercle de la pile
6. Couvercle du compartiment pile
7. Bouton à trou d'épingle pour le couplage
8. Trou pour porte-clés

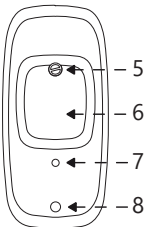


Comment utiliser votre télécommande

Comment coupler votre télécommande avec vos aides auditives

Avant de pouvoir utiliser votre télécommande, vous devez la coupler avec vos aides auditives en suivant la procédure ci-dessous.

1. Appuyez sur le bouton à trou d'épingle situé à l'arrière de la télécommande à l'aide d'un objet suffisamment petit pour s'insérer facilement dans le trou. Votre télécommande sera en mode couplage pendant 20 secondes.
2. Éteignez puis rallumez vos aides auditives et placez-les à environ 5 cm/2" de la télécommande pour démarrer le couplage.

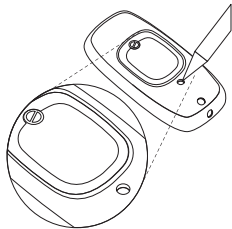

3. Vous entendrez un son provenant de vos aides auditives lorsque le couplage sera réussi.
4. Si vous n'entendez pas la notification de couplage, consultez votre audioprothésiste.



AVERTISSEMENT : Connectez la télécommande uniquement aux équipements pour lesquelles elle est explicitement prévue.

Information sur les LED


Le voyant lumineux LED de votre télécommande s'allume chaque fois que vous appuyez sur le bouton de volume ou le bouton sélecteur de programme.

Lorsque la télécommande est en mode couplage, le voyant lumineux LED clignote toutes les deux secondes.

Régler le volume de vos aides auditives avec votre télécommande

Votre aide auditive ajuste le son automatiquement, mais vous pouvez également le régler manuellement. Dans ce cas, suivez ces étapes simples.

- a. Appuyez sur la partie supérieure de la commande de volume (+) pour augmenter le volume.
- b. Appuyez sur la partie inférieure de la commande de volume (-) pour réduire le volume.

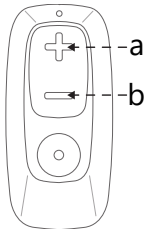


REMARQUE : Votre aide auditive retrouvera le volume sonore par défaut lorsque vous l'éteindrez et la remettrez en marche, ou si vous changez de programme.

REMARQUE : Vous pouvez également couper le son de votre aide auditive (mode sourdine) en appuyant sur le bouton de réduction du volume (-) pendant plus d'une seconde. Pour réactiver le son, appuyez sur n'importe quel bouton.

Modifier les programmes de vos aides auditives à l'aide de la télécommande

1. Appuyez sur le bouton sélecteur de programme pour changer de programme.

REMARQUE : Votre aide auditive retrouvera le programme d'écoute par défaut lorsque vous l'éteindrez et la remettrez en marche.

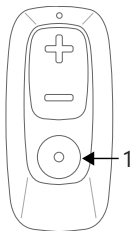

Transmission du son vers vos aides auditives à l'aide de votre télécommande

Vous pouvez recevoir du son directement dans votre aide auditive si votre audioprothésiste a activé un programme de transmission.


Pour activer votre programme de transmission.

1. Appuyez sur le bouton sélecteur de programme et maintenez-le appuyé pendant au moins une seconde, ou jusqu'à ce que vous entendiez un son. Votre aide auditive va maintenant commencer à transmettre le son de votre équipement sans fil.
2. Pour revenir au programme d'écoute que vous utilisiez auparavant, il vous suffit d'appuyer sur le bouton sélecteur de programme.

Comment verrouiller votre télécommande

Vous pouvez verrouiller votre télécommande afin d'éviter toute opération indésirable, par exemple lorsque vous la transportez dans votre poche.

1. Appuyez simultanément sur le bouton sélecteur de programme et le bouton de volume (-) et maintenez-les enfoncés pendant cinq secondes. Le voyant lumineux LED situé sur le dessus de la télécommande doit clignoter trois fois.
2. Pour déverrouiller votre télécommande, répétez la première étape. Lors du déverrouillage, le voyant lumineux LED ne clignote qu'une seule fois.

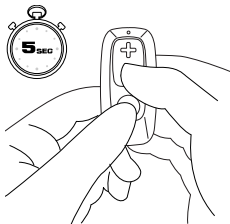

REMARQUE : Le voyant lumineux LED clignote trois fois à chaque fois que vous appuyez sur une touche de la télécommande lorsqu'elle est verrouillée, mais cela n'entraîne aucun changement de volume ou de programme.

Pour le Télécommande utilisé avec des aides auditives sur ordonnance, contactez votre audioprothésiste si votre équipement ne fonctionne pas correctement.

Comment remplacer la pile

La pile

Utilisez une pile **CR2032** pour votre télécommande. Il s'agit d'une pile au dioxyde de manganèse et elle n'est pas rechargeable.


Conseils sur la gestion de la pile

REMARQUE : Utilisez toujours des piles neuves recommandées par votre audioprothésiste.


REMARQUE : Consultez votre audioprothésiste si vous avez besoin d'informations sur votre pile usagée.

REMARQUE : Ne tenez jamais la nouvelle pile qu'en la saisissant par le bord fin. Le fait de tenir simultanément les surfaces planes supérieure et inférieure peut réduire l'autonomie de la pile.


1. Utilisez un tournevis plat pour desserrer la vis du couvercle de la pile, puis soulevez délicatement le bord supérieur près de la vis pour retirer le couvercle.

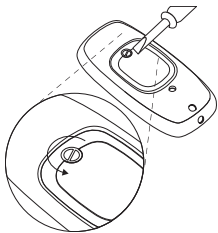

2. Retirez l'ancienne pile et mettez-la au rebut conformément à la réglementation locale.

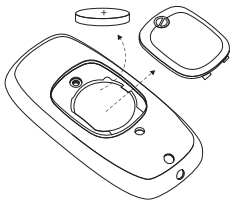


3. Placez la nouvelle pile avec le signe + orienté vers le haut. Remplacez le couvercle de la pile à son emplacement d'origine.

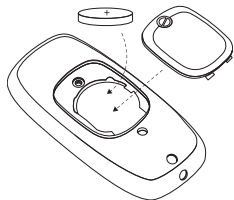

4. Utilisez un tournevis plat pour serrer la vis.

REMARQUE : Ne serrez pas trop la vis.

REMARQUE : Si vous n'êtes pas sûr que le couvercle de la pile est fermé en toute sécurité, demandez de l'aide à votre audioprothésiste.

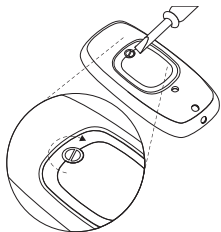

Mises en garde à propos des piles et batteries

- Gardez vos aides auditives et équipements, ainsi que toutes les pièces, piles et aimants, hors de portée des animaux domestiques, des enfants et des personnes aux capacités cognitives, intellectuelles ou mentales réduites.
- Consultez immédiatement un médecin en cas d'ingestion d'une aide auditive, d'un équipement, de leurs pièces, d'une pile ou des aimants, au risque de vous étouffer et de nuire à votre santé.
- Les piles usagées sont nocives pour l'environnement. Par conséquent, n'essayez jamais de les brûler. Éliminez vos piles usagées conformément aux réglementations en vigueur dans votre pays ou renvoyez-les à votre audioprothésiste.
- Les piles présentent un risque de fuite. Retirez la pile de la télécommande si vous ne l'utiliserez pas pendant plusieurs jours.
- Ne rechargez jamais les piles boutons, car elles présentent des risques de fuite ou d'explosion.
- L'ingestion peut entraîner la mort ou des blessures graves. L'ingestion d'une pile bouton peut provoquer des brûlures chimiques internes en seulement 2 heures.

Nettoyage et maintenance

- Nettoyez la télécommande à l'aide d'un chiffon sec. N'utilisez jamais de produits d'entretien ménagers (détergent, savon, etc .), ou d'alcool pour nettoyer cet équipement.
- Éloignez votre télécommande de toute source d'humidité (baignoire, piscine) ou de chaleur (radiateur, tableau de bord de véhicule) excessive. Protégez la télécommande des chocs et des vibrations.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution éventuelle
Le voyant lumineux LED ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur un bouton	Pile/batterie vide	Remplacez la pile
	La télécommande est occupée à communiquer avec les aides auditives	Attendez quelques secondes, puis réessayez
Le voyant lumineux LED s'allume lorsque vous appuyez sur un bouton, mais le volume ou le programme ne change pas	La télécommande est hors de portée ou le signal est bloqué	Rapprocher la télécommande des aides auditives

Mises en garde et avertissements



Mises en garde générales

- Ne laissez jamais sans surveillance des enfants ou des personnes aux capacités cognitives, intellectuelles ou mentales réduites qui utilisent leurs équipements
- Maintenez l'équipement et tous les cordons éloignés de machines en marche.
- N'utilisez pas votre télécommande en présence de gaz inflammable, ou dans tout local présentant un risque de combustion.
- Une exposition à différents types de rayonnements (dont les tomodensitométries) et IRM peut affecter le bon fonctionnement de cet équipement. Il est recommandé de laisser la télécommande à l'extérieur de la salle de scanner.
- Évitez d'exposer votre équipement à la pluie, à l'humidité ou à d'autres liquides afin de ne pas l'endommager et d'éviter de vous blesser.
- Aucune modification de cet équipement n'est autorisée.
- N'utilisez pas votre Télécommande s'il est endommagé – contactez votre audioprothésiste.

Mises en garde concernant les équipements sans fil

- Lorsque les communications sans fil sont actives, votre équipement utilise une transmission sans fil basse puissance à codage numérique pour communiquer avec d'autres équipements sans fil. Bien que peu probable, le fonctionnement d'équipements électroniques situés à proximité peut être affecté. Dans ce cas, éloignez l'équipement de l'équipement électronique concerné.
- La télécommande peut être perturbée par un autre équipement. Dans ce cas, éloignez la télécommande de l'équipement concerné.

Mises en garde concernant les équipements sans fil

- Vos aides auditives et cet équipement ont reçu un code de communication unique lors de leur réglage. Ceci garantit que l'équipement n'interférera pas avec les aides auditives portées par d'autres personnes.
- Les équipements électroniques puissants, les installations électroniques d'envergure ainsi que les structures métalliques peuvent sensiblement réduire le rayon d'action.

- Si l'aide auditive ne répond pas à cause d'une perturbation inhabituelle, éloignez-vous de cette perturbation.
- N'utilisez pas cet équipement dans des emplacements où il est interdit d'utiliser des équipements électroniques.
- Ouvrir ou modifier le Télécommande risque de l'endommager. Si un problème persiste et qu'il ne peut pas être résolu par une solution proposée dans le mode d'emploi, consultez votre audioprothésiste.
- Le Télécommande peut être réparé uniquement pas un centre de réparations autorisé.

Informations légales

Informations sur la température, le transport et le stockage

Votre télécommande est soumise à divers tests de cycles de température et de chauffage humide entre -25 °C et 70 °C, conformément aux normes internes et industrielles.

Température de stockage : -20 °C et 60 °C.

Données techniques

Rayon d'action	Jusqu'à 3 mètres
Technologie sans fil	2,4 GHz
Température de fonctionnement	0 à 55 °C
Puissance de sortie RF nominale transmise	4 dBm

Garanties et réparations

Le RC-3 est couvert par une garantie limitée émise par le fabricant pour une période de 12 mois à partir de la date d'achat originale. Une garantie étendue peut s'appliquer dans certains pays. Contactez votre audioprothésiste pour obtenir plus d'informations à ce sujet.

La garantie couvre

Tout composant électrique qui, en raison de défaut de fabrication ou de conception, ne fonctionne pas correctement pendant une utilisation normale pendant la durée de vie de cette garantie sera remplacé ou réparé sans frais de pièces ou de main d'œuvre, sous réserve de leur retour au point de vente.

S'il est déterminé qu'une réparation n'est pas possible, l'unité entière peut être remplacée par une unité équivalente après accord entre l'audioprothésiste et l'utilisateur.

La garantie ne couvre pas

Les dysfonctionnements résultant d'un usage impropre ou abusif, d'un défaut de soin, d'accidents, de réparations réalisées par une tierce partie non agréée, d'une exposition à un milieu corrosif ou de dommages causés par des corps étrangers à l'intérieur de l'équipement ne sont PAS couverts par la présente garantie et peuvent entraîner son annulation. La présente garantie

n'affecte aucunement les droits que vous pourriez détenir conformément à la législation nationale applicable en matière de vente de produits de consommation. Votre audioprothésiste peut avoir émis une garantie qui va au-delà des clauses de cette garantie limitée. Consultez votre audioprothésiste pour obtenir plus d'informations.

Informations régionales

Union européenne

Ce produit, modèle : RC-3, respecte les conditions réglementaires suivantes.

Au sein de l'Union Européenne : Cet équipement est conforme aux exigences de sécurité et de performance générales de l'Annexe I du règlement européen 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux (MDR)

Par la présente, GN Hearing A/S déclare que l'équipement radio de type RC-3 est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité européenne est disponible à l'adresse suivante : www.declarations.resound.com/en.

En dehors des états membres de l'Union Européenne, veuillez vous référer aux exigences réglementaires internationales en vigueur dans ces pays.

REMARQUE : Cet équipement fonctionne dans la plage d'application comprise entre 2,4 et 2,48 GHz. Cet équipement utilise un émetteur RF qui fonctionne dans la bande de fréquence 2,4 GHz et 2,48 GHz.

Informations copyright

© 2025 GN Hearing A/S. Tous droits réservés. ReSound est une marque déposée de GN Hearing A/S.

Remarques

Remarques

Fabricant selon le Règlement
européen relatif aux dispositifs
médicaux 2017/745 :



GN Hearing A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Danemark
resound.com

Contacts locaux :

France

GN Hearing SAS
Zone Silic – Bâtiment Liège
1 place des États-Unis
FR-94150 Rungis
Tél. : +33 (0)1 75 37 70 00
info@gnhearing.fr
resound.fr

Suisse

GN Hearing Switzerland AG
Seestrasse 353
8038 Zürich
Tél.: +41 44 722 91 11
info@gnresound.ch
resound.ch

Belgique

GN Hearing Benelux BV
Postbus 85
NL-6930 AB Westervoort
Tél: + 32 (0)2 513 55 91
info@gnresound.be
resound.com



Tout incident grave survenu en relation avec l'équipement doit être signalé au fabricant légal GN Hearing A/S et à l'autorité compétente de l'État membre de l'UE dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.