


## 4. Utilisation du Power Pack en option

1.

Raccordez le Power Pack au bas du chargeur et verrouillez-le.

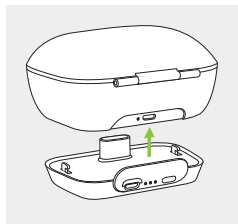


2.

Branchez le câble micro-USB et connectez-le à une source d'alimentation externe. Le Power Pack et les aides auditives chargeront en même temps. Lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation externe, le témoin lumineux du Power Pack affiche l'état de charge actuel du Power Pack.

ⓘ Avant la première utilisation du Power Pack, il est recommandé de charger les aides auditives pendant 3 heures.

Connexion micro-USB à une source d'alimentation externe

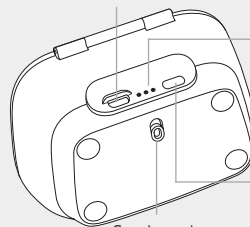

Témoin lumineux d'état de la batterie :

- 0 % - 29 %
- 30 % - 59 %
- 60 % - 100 %

Bouton-poussoir de vérification de l'état de la batterie

Système de verrouillage et déverrouillage du Power Pack

3.

Pour connaître la capacité restante du Power Pack, appuyez sur le bouton-poussoir de vérification de l'état de la batterie. Les témoins lumineux affichent l'état.

ⓘ Veillez à charger le Power Pack dans la plage de températures d'utilisation : +5 °C à +40 ° Celsius.